


# OTO CAPSULE CP-01

Руководство пользователя

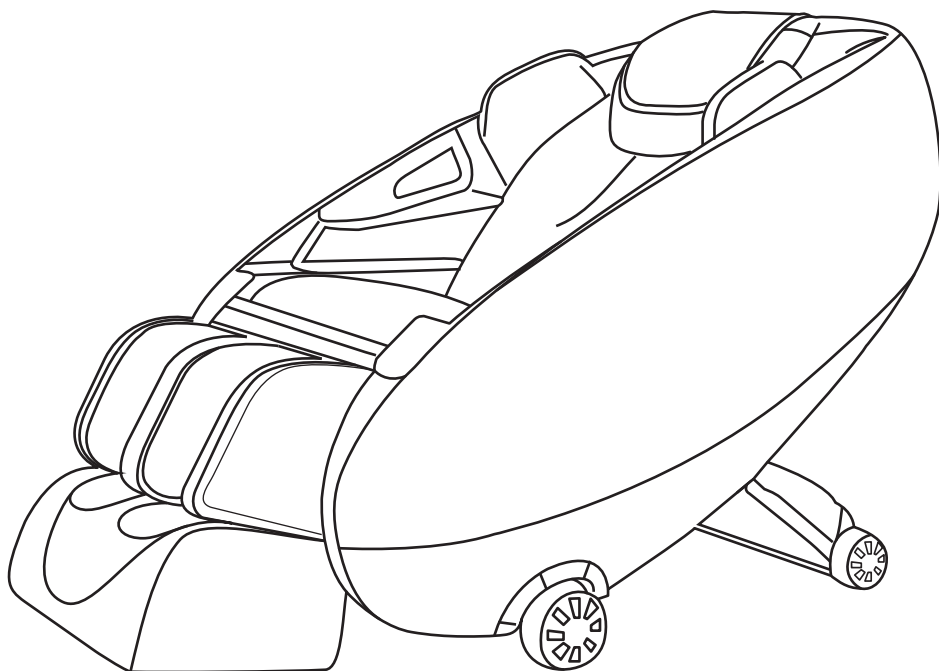

Версия 1.22



# OTO CAPSULE CP-01

Благодарим Вас за выбор продукции ОТО, которая призвана улучшить Ваше здоровье. Все товары ОТО перед продажей прошли проверку и отвечают требованиям безопасной и надежной эксплуатации для домашнего использования.

**Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, чтобы правильно пользоваться и обслуживать кресло.**

# СОДЕРЖАНИЕ

---

Меры безопасности .....	2 - 3
Составные части .....	4
Порядок управления .....	5 - 8
Порядок эксплуатации .....	9
Подготовка к работе .....	10
Размещение и перемещение .....	11 - 12
Функциональные особенности .....	17
Уход и обслуживание .....	18
Устранение проблем .....	19
Спецификация .....	20

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

---

1. Следующим людям необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием массажного кресла:

- Кто использует медицинские электронные устройства, встроенные в организм, например кардиостимулятор
- Кто страдает сердечными заболеваниями
- Кто страдает заболеваниями позвоночника
- Кто страдает от хрупкости костей, особенно в области позвоночника
- Беременным женщинам или в послеродовой период
- Кто страдает злокачественными опухолями
- Кто страдает остеопорозом
- Кто страдает кожными заболеваниями или инфекциями
- Кто имеет какие-либо физические отклонения
- Кто проходил лечение или проходит его в настоящее время
- Людям с аномалией или деформацией конечностей или позвоночника
- Кто недавно перенес операцию.

2. Избегайте контакта кресла с водой, попадания брызг на поверхность, попадания воды внутрь.

3. Контакт воды с электричеством опасен. Не ставьте кресло во влажную среду (например, в ванную комнату, душевую или около бассейна и т. д.).

4. Перед подключением кресла к питанию убедитесь, что напряжение источника питания совместимо с входным напряжением кресла.

5. Если вилка, шнур питания или само кресло повреждены, немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр.

6. Не пытайтесь отремонтировать кресло самостоятельно и разбирать его. Это может привести к травмам или поражению электрическим током.

7. Кресло не предназначено для использования инвалидами, людьми с нарушением сенсорных или умственных способностей (включая детей), кроме случаев, когда они находятся под присмотром ответственного за их безопасность, который осуществляет контроль или управление креслом.

8. Если кресло или шнур питания повреждены, не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно. Свяжитесь с сервисным центром ОТО, иначе гарантия на обслуживание будет аннулирована.

9. Детям запрещено использовать кресло без присмотра. Они должны находиться под наблюдением, чтобы исключить случаи игры на кресле.

10. Если кресло издает необычный звук или шум, выключите его и обесточьте. Пожалуйста, свяжитесь с ОТО или авторизованным дилером.

11. Не используйте кресло, если оно повреждено или произошел механический или электронный сбой. Пожалуйста, свяжитесь с ОТО или авторизованным дилером.

12. Устанавливайте кресло только в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве пользователя.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

---

13. Не используйте кресло во влажной и высокотемпературной среде или рядом с обогревательными приборами, такими как обогреватели, плиты.
14. Не наносите медицинский или косметический крем на кресло или на тело до или во время его использования.
15. При массаже области шеи следите за движением роликов и воздерживайтесь от применения чрезмерной силы.
16. Не повреждайте, не сгибайте, не растягивайте, не скручивайте и не завязывайте шнур питания. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
17. Не используйте массаж на голое тело.
18. Рекомендуемое время массажа не более 30 минут за сеанс.
19. Максимальная нагрузка на кресло составляет 120 кг. Если нагрузка будет выше, ресурс кресла может снизиться или кресло выйти из строя.
20. Содержите кресло в чистоте и никогда не помещайте какие-либо предметы внутрь корпуса.
21. Кресло предназначено только для домашнего использования.
22. Не стойте, не садитесь и не прыгайте на подставке ног во избежание травм или повреждений.
24. При использовании функции нагрева избегайте длительного контакта с одной и той же частью тела.
25. Рекомендовано снять все украшения перед использованием кресла.
26. Не используйте кресло во время сна, в состоянии алкогольного опьянения или при высокой температуре.
27. Избегайте использования кресла сразу после еды. Подождите не менее часа, прежде чем начать массаж.

## **Электромагнитные поля (ЭДС)**

Этот продукт ОТО соответствует всем стандартам, касающимся электромагнитных полей (ЭДС).

# СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ




# ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ

## Пульт управления





# ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ

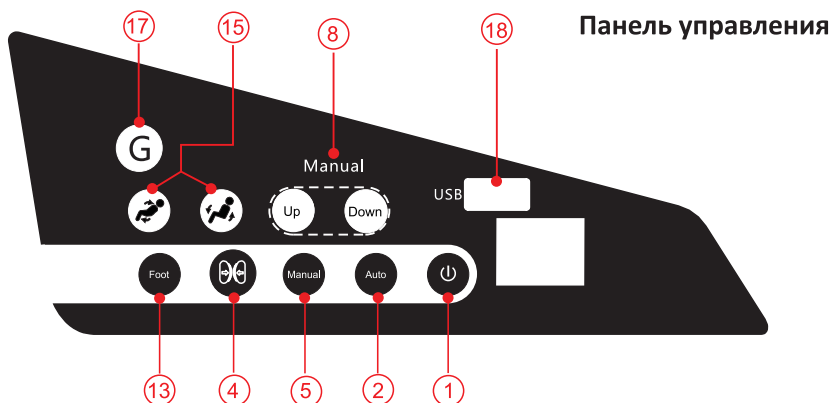


## Описание кнопок управления:

- ① **ВКЛ / ВЫКЛ**  
Кнопка питания ВКЛ / ВЫКЛ
- ② **5 Авто Программ**  
Программа А: Шведский массаж (Swedish massage)  
Программа В: Тайский массаж (Thai massage)  
Программа С: Китайский массаж (Chinese massage)  
Программа D: Режим растяжки (Stretch mode)  
Программа E: Режим сна (Sleep mode)
- ③ **Авто компрессия (Auto Air-massage)**  
Функция автоматической настройки интенсивности компрессии  
**Установка компрессии (Air-massage setting)**  
Функция ручной настройки интенсивности компрессии
- ④ **Сила компрессии (Air pressure)**  
Установка интенсивности компрессии 3 уровня
- ⑤ **Ручная настройка массажа (Massage setrting)**  
Ручная установка интенсивности массажа и компрессии
- ⑥ **Сила массажа (Power Increase / Decrease)**  
Ручная настройка интенсивности массажа
- ⑦ **Ширина (Adjust width)**  
Нажмите кнопку для установки ширины размещения массажных роликов в разминающем, постукивающем и шиаццу режиме

# ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ

---


- ⑧ **Массаж Вверх / Вниз (Massage Up / Down)**  
Нажмите для ручной установки положения массажных роликов
- ⑨ **Зона массажа (Partial massage)**  
Нажмите для ручной установки зоны Шиатцу массажа (шея, плечи, спина, поясница, ягодицы)
- ⑩ **Точечный массаж (Spot massage)**  
Нажмите для ручного фиксирования массажа в выбранной точке
- ⑪ **Массаж всего тела (Full massage)**  
Нажмите для активации массажа для всего тела (шея, плечи, спина, поясница, ягодицы)
- ⑫ **Прогрев (Heat therapy)**  
Нажмите для активации функции прогрева
- ⑬ **Скорость массажа стоп (Foot massage speed)**  
Нажмите для включения/выключения массажа стоп с 3 уровнями скорости
- ⑭ **Таймер (Timer)**  
По умолчанию таймер установлен на 15 минут, вы можете настроить время сеанса от 15 до 30 минут
- ⑮ **Наклон спинки кресла**
  -  Спинка вверх: Нажмите и держите для наклона спинки вверх
  -  Спинка вниз: Нажмите и держите для наклона спинки вниз
- ⑯ **Наклон подставки ног**
  -  Подставка вверх: Нажмите и держите для наклона подставки вверх
  -  Подставка вниз: Нажмите и держите для наклона подставки вниз
- ⑰ **Невесомость (Zero Gravity)**  
Нажмите для раскладывания кресла в положение невесомости
- ⑱ **USB порт для подзарядки**  
Используйте для подзарядки мобильного телефона

## Подключение по Bluetooth

- Зайдите в настройки телефона и нажмите на значок Bluetooth;
- Откройте на телефоне соединение с устройством Bluetooth.
- Найдите "CP-01".
- Нажмите и подтвердите соединение, чтобы выполнить сопряжение с массажным креслом.
- Музыка воспроизводится после успешного подключения.


# ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ

## Дисплей пульта управления

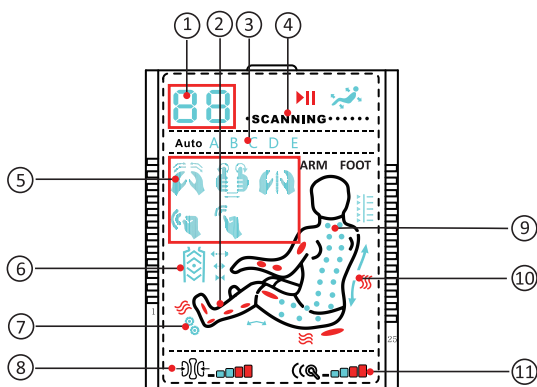

- ① **Время:** 15 минут настройка времени по умолчанию
- ② **Воздушная компрессия:** индикация работы воздушной компрессии, которая включается в области: руки, бедра, ягодицы, икры и стопы.
- ③ **5 Авто программ:** А: Шведский Массаж, В: Тайский Массаж, С: Китайский Массаж, D: Режим растяжки, E: Спящий режим
- ④ **Сканирование плеч:** Процесс интеллектуального сканирования тела определяет точное положение высоты плеч.
- ⑤ **Техника массажа:** разминание, растирание, комбинированный, шиацу, туина
- ⑥ **Зона массажа (Вся спина/область/точка):** массаж всего тела или массажирование определенных участков тела.
- ⑦ **Ролики для ног:** разминание и скраб массаж для подошвы ног
- ⑧ **Сила компрессии:** регулировка компрессии воздушных подушек
- ⑨ **Положение массажных роликов:** полное или частичное перемещение роликов вверх и вниз.
- ⑩ **Тепловая терапия:** Индикация прогрева спины, бедер и стоп.
- ⑪ **Интенсивность роликового массажа:** увеличение или уменьшение силы роликового массажа


# ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

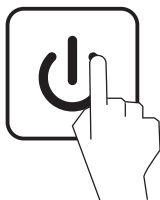

## 1. Кнопка ВКЛ/ВЫК

Нажмите кнопку питания на панели быстрого управления, расположенной на подлокотнике, или с помощью пульта управления кресла.

**Время по умолчанию: 15 минут**

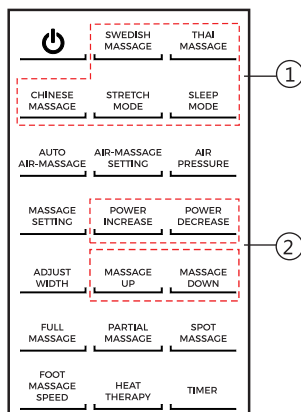

## 2. Выберите желаемую программу массажа

### ① 5 Автоматических программ

Программа А: Шведский Массаж

Программа В: Тайский Массаж

Программа С: Китайский Массаж

Программа D: Режим Растяжки


Программа Е: Спящий режим

### ② Программы ручного массажа


#### Ручной режим

Выберите любую настройку режима ручного массажа в зоне воздействия.

- Регулируемая интенсивность компрессии
- Интенсивность/ положение массажных роликов.

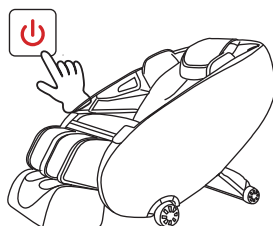


Нажмите кнопку питания, чтобы выключить кресло после использования. Массажные ролики перестанут функционировать, после чего кресло вернется в стационарное вертикальное положение.

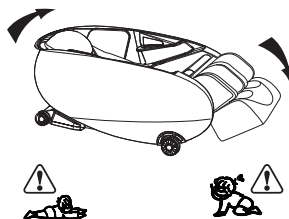

## Внимание!


- Храните кресло в недоступном для детей месте
- Убедитесь, что вокруг массажного кресла нет посторонних предметов.
- Датчики безопасности, установленные сзади и под креслом, предотвращают любые травмы, когда кресло откидывается назад.

# ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

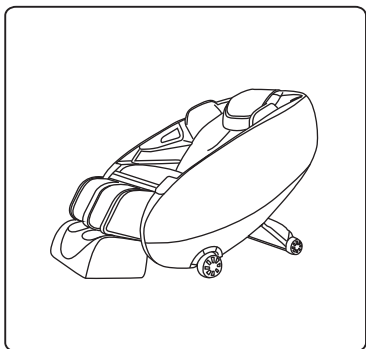


**Убедитесь, что кресло находится в рабочем состоянии**

- Убедитесь, что спинка и подголовник правильно закреплены.
- Убедитесь, что вилка сетевого шнура находится в исправном состоянии.
- Убедитесь, что опорная рама кресла находится в вертикальном положении, чтобы предотвратить его повреждение при воздействии нагрузки во время сидения или лежания.

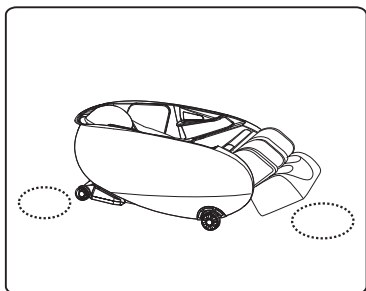


**Убедитесь, что вблизи массажного кресла нет посторонних предметов.**

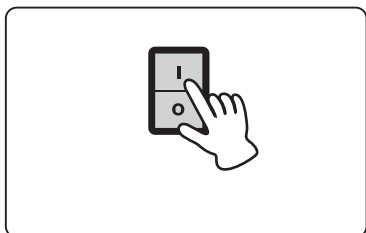

**Подключение кресла к источнику питания**

- Подключите вилку к розетке.
- Включите выключатель питания на задней панели кресла.
- При этом на панели управления загорится индикатор питания

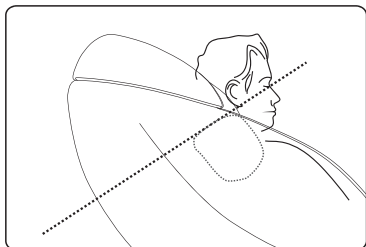


**Регулировка положения подголовника**

- Отрегулируйте положение подголовника в соответствии со своим ростом. Не рекомендуется размещать подголовник слишком высоко, что может повлиять на эффект массажа шеи.


# РАЗМЕЩЕНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

## 1. Размещение массажного кресла

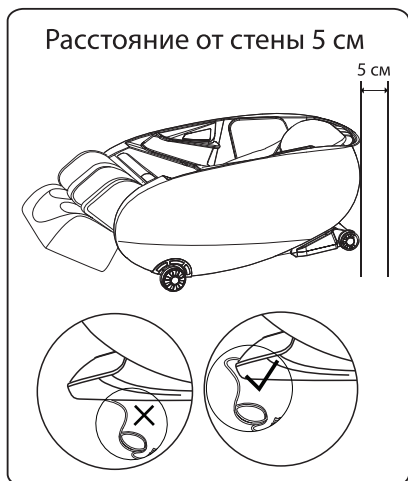

- Установите массажное кресло на расстоянии 5 см от стены и оставьте 50 см свободного пространства спереди.
- Не прокладывайте кабель под основанием массажного кресла.
- Разместите кресло на половике или коврик, чтобы предотвратить пол от царапин и уменьшить шум.
- Чтобы предотвратить помехи сигнала, разместите массажное кресло подальше от предметов с радиочастотным излучением.

## 2. Перемещение массажного кресла

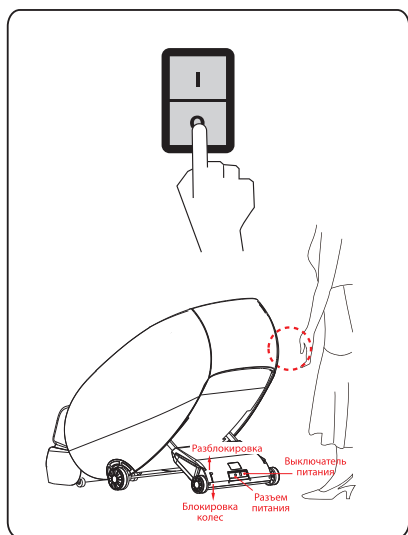


- Отключите питание кресла на задней панели основания.
- Отсоедините шнур питания из розетки.
- Отпустите фиксатор крепления задних колес кресла, переключив натяжную пружину вверх, чтобы быстро разблокировать колеса.
- Нажмите на заднюю часть спинки кресла, чтобы переместить его.

При перемещении кресла разместите его на коврик или паласе чтобы предотвратить случайное повреждение пола.

# РАЗМЕЩЕНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

## 3. После массажа

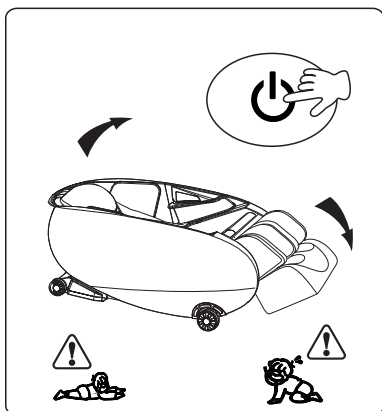

Нажмите кнопку  вкл/выкл, после чего кресло вернется в вертикальное положение.

Всегда проверяйте, нет ли каких-либо предметов за массажным креслом, прежде чем откидывать его назад.

Держите детей подальше от работающего кресла с откидывающейся спинкой и наклоняемой подставкой ног.



Выключите главный переключатель питания, расположенный на задней нижней панели массажного кресла

Выньте вилку шнура питания из розетки.

# УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ


---

Если вы столкнулись в проблемой при использовании кресла, попробуйте решить её предложенными ниже способами. Если этого сделать не удалось, обратитесь в Сервисный центр ОТО для получения консультации.

Проблема	Возможная причина	Решение
Кресло не работает	Шнур питания подключен не правильно	Подключите шнур питания к креслу и убедитесь, что вилка надежно вставлена в розетку.
	Кресло завершило заданный таймером цикл массажа и перешло в режим ожидания	Нажмите  для начала нового сеанса массажа.
	Кресло чрезмерно перегружено	Уменьшите нагрузку и перезапустите кресло
Кресло перегрелось	Массажное кресло использовалось слишком долго	Выключите кресло и дайте ему остыть, прежде чем начать массаж.
При работе кресло издает механические звуки	Звуки издает массажный механизм кресла, в том числе насос и воздушный клапан	Это нормальное явление и оно не может считаться признаком неисправности.




# УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

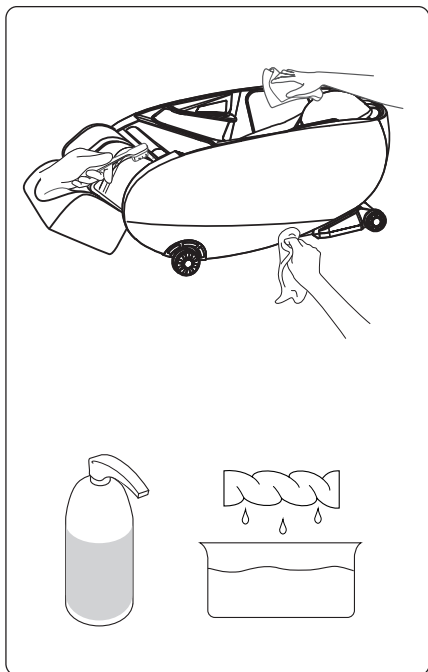

## Чистка

- Не используйте для чистки массажного кресла металлическую губку, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости - такие, как бензин или ацетон.
- Перед чисткой обязательно вытащите вилку из розетки питания.
- Очистите кресло, пульт управления и шнур питания влажной тканью, слегка смоченной в воде.
- После чистки насухо вытрите кресло сухой тканью.
- Не используйте моющие средства.

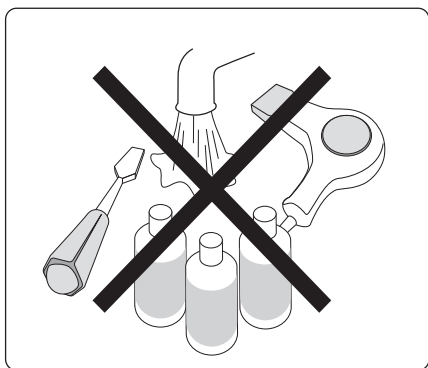


## Хранение

- Отключите вилку из розетки питания.
- Храните кресло в сухом и прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей.
- Не кладите на массажное кресло тяжелые предметы.

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

---

Наименование	ОТО CAPSULE
Модель	CP-01
Тип	Массажное кресло
Напряжение питания	Входное AC 220 - 240 В, 50/60 Гц Выходное DC 24 В
Мощность	96 Вт
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	Сложенное: 152 x 74 x 106 см Разложенное: 173 x 74 x 63 см
Таймер	15 минут
Вес Нетто / Брутто	68 кг / 81 кг
Стандарт безопасности	

**OTO**  
**CAPSULE**  
**CP-01**

**OTO**